

Ficha Técnica

CERA IDEAL

Indicação:

Auxilia na elaboração de prótese dentária.
Confecção de roletes para oclusão, ajuste de moldeiras de estoque
e ajuste de modelos em articulador.

**Características/Benefícios:**

- Aromatizada.
- Fácil manuseio.

Apresentações:

Embalagem com 225g

Modelos Disponíveis:

Articulação
Utilidade
Rolete
Cera 7
Cera 9
Cera 7 Nordeste

Composição:

Parafina
Vaselina
Aromatizante
Corante.

Instruções de Uso:

Recortar da lâmina a quantidade necessária. A cera pode ser levemente aquecida, por exemplo, sobre o bico de Bunsen, para torná-la mais maleável.
O processamento simples da cera permite um trabalho fácil e rápido.
A cera Utilidade é ideal para fixação de modelos e alívio de áreas retentivas.

Advertências e precauções:

Utilizar equipamento de proteção individual.

Conservar ao abrigo de luz e calor. (2°C a 35°C)

Não descartar os resíduos em esgotos e curso d'água ou no lixo doméstico

Produto destinado somente para uso odontológico

Seguir os procedimentos usuais de limpeza e higiene para manipulação do produto•

Evitar contato com a pele e com os olhos.

Não contaminar o frasco com resíduos de gesso.

Não inflamável.

Se houver irritação, procure um médico.

Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.

Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procurar auxílio médico.



Validade: 10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro ANVISA N°:

81941860005

Responsável Técnico:

Renato de Castro Caetano - CRQ 04480318