

Ficha Técnica

# **BINDER IDEAL**

Silicato de Etila



**Dentária Brasil**

**Indicação:**

O Binder Ideal é um produto utilizado para o preparo de líquido de mistura para revestimentos a base de quartzo.

**Apresentação:**

Embalagens de 1000 ml e de 5000 ml – nas versões 28% e 40%.

**Modo de uso:**

Em um recipiente, misturar o Binder Ideal com Álcool e só depois, lentamente, colocar o reator, misturando constantemente. Agitar até esquentar.

**Advertências e Precauções:**

- Evitar inalação, ingestão, contato com os olhos ou pele. Caso ocorra algum contato ou reação em virtude do uso do produto, consulte imediatamente um médico.
- Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave imediatamente as partes atingidas com água abundante, durante no mínimo 15 minutos. Procure atendimento médico.
- Se ingerido, não provoque vômito. Tome grande quantidade de água para diluição do produto. Consulte um médico.
- Para o manuseio do produto recomenda-se o uso de roupas, luvas, máscara e óculos de proteção.
- Não reutilize a embalagem e mantenha o produto fora do alcance de crianças.

**Armazenamento e Conservação:**

Manter em lugar fresco, ventilado e livre de umidade.

Manter longe do calor, de faíscas elétricas e de chamas.

Manter o produto em embalagem original.

Aplicação Industrial.

**Composição:** Silicato de Etila - 28% e 40%.

**Validade:** 18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

**Produto Isento de Registro na ANVISA.**

**Responsável Técnico:** Renato de Castro Caetano – CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



**DentáriaBrasil**