

Ficha Técnica  
**IDEAL** *Cera*  
Ceras Odontológicas



**Dentária Brasil**

**Indicação:**

Auxilia na elaboração de prótese dentária.  
Confecção de roletes para oclusão, ajuste de moldeiras de estoque e ajuste de modelos em articulador.

**Características e Benefícios:**

- Aromatizada.
- Fácil manuseio.

**Apresentações:**

Embalagem unitárias com 225g ou pacotes de 180 lâminas - 2.250g

**Modelos Disponíveis:**

Articulação  
Utilidade  
Rolete  
Cera 7  
Cera 9  
Orto  
Cera 7 Nordeste  
Utilidade branca

**Instruções de Uso:**

Recortar da lâmina a quantidade necessária. A cera pode ser levemente aquecida, por exemplo, sobre o bico de Bunsen, para torná-la mais maleável.  
O processamento simples da cera permite um trabalho fácil e rápido.  
A cera Utilidade é ideal para fixação de modelos e alívio de áreas retentivas.

**Advertências e Precauções:**

- Utilizar equipamento de proteção individual.
- Conservar ao abrigo de luz e calor. (2°C a 35°C).
- Não descartar os resíduos em esgotos e curso d'água ou no lixo doméstico
- Produto destinado somente para uso odontológico.
- Seguir os procedimentos usuais de limpeza e higiene para manipulação do produto• Evitar contato com a pele e com os olhos.
- Não contaminar o frasco com resíduos de gesso.
- Não inflamável.
- Se houver irritação, procure um médico.
- Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
- Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito.
- Procurar auxílio médico.



**Utilização:**

Modelo Rolete - é chamada também de plano de cera ou plano de oclusão. Trata-se de um pré-moldado de alta flexibilidade em formato pronto de plano de cera para definição da altura oclusal da prótese. Por ser uma cera de alta flexibilidade e vir em formato pronto de um plano de cera, facilita muito o trabalho do protético.

Modelo Utilidade - serve para auxiliar o protético na elaboração de próteses dentárias, ajuste de moldeira de estoque e ajuste de modelos em articulador, entre outros. Disponível nas cores vermelha e branca.

Modelo Orto - é usada por alguns profissionais como cera de proteção das gengivas no uso dos aparelhos ortodônticos.

Modelo Cera 7 - é utilizada no consultório odontológico para impressão ou registro de mordidas. No laboratório é usada para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis. Possui uma consistência mais macia.

Modelo Cera 9 - é usada no laboratório para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis. Possui uma consistência mais dura, geralmente é usada em dias mais quentes, tornando o manuseio mais fácil.

Modelo Articulação - é usada para alívio de contatos prematuros, retenções na moldagem, ajuste de modelos em articulador e também para medir a altura da articulação do paciente.

Modelo Cera 7 Nordeste é utilizada no consultório odontológico para impressão ou registro de mordidas. No laboratório é usada para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis. Possui uma consistência mais resistente, para locais com temperatura mais alta.



**Composição:** Parafina, Vaselina, Aromatizante e Corante.

**IDEAL** *Cera*

**Validade:** 10 anos a partir da data de fabricação.

**Cadastro ANVISA N°:**

81941860005

**Responsável Técnico:**

Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



**Dentária Brasil**