

Ficha Técnica
IDEAL *Film*
Líquido Isolante



Dentária Brasil

Indicação:

Líquido para isolamento de gesso em trabalhos protéticos.

Características e Benefícios:

- Para uso nas técnicas convencional e microondas.
- De fácil aplicação devido à sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes propriedades isolantes.
- A espessura do filme é adequada, não causando alterações dimensionais.
- Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho.

Apresentações:

Frascos de 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml.

Instruções de Uso:

Usar modelo de gesso previamente hidratado.

Na aplicação, utilize sempre um pincel limpo cobrindo toda a superfície isolada com cuidado para não atingir a parte posterior dos dentes.

Advertências e precauções:

- Manter o frasco fechado.
- Conservar ao abrigo de luz e calor.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evitar contato com a pele e com os olhos.
- Não contaminar o frasco com resíduos de gesso.
- Não inflamável.
- Se houver irritação, procure um médico.
- Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
- Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procurar auxílio médico.

Composição: Alginato, Conservantes e Água.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Produto Isento de Registro na ANVISA.

Responsável Técnico:

Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br

**Dentária Brasil**