

Ficha Técnica
DENTLUX
Dente Acrílico 2 Camadas



Indicação:

O DentLux é indicado para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

Características e Benefícios:

- Prensagem de duas camadas, propiciando um aspecto natural.
- Produzidos com alta tecnologia, em matrizes cujos moldes digitalizados propiciam maior fidelidade, simetria e riqueza de detalhes.
- Compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
- Angulação de 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.

Apresentações:

Escala de Cores: 59,60,62,66,67 e 69.

Modelos disponíveis:

Posteriores superior e inferior: M2,M3,M4,M5 e M6.

Anteriores superiores: E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44 e T4B.

Anteriores inferiores: L1, L3, L5, L7, L10, K6, K10 e K12.



Instruções de Uso:

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes.

Recomendações ao paciente:

Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Advertências e precauções:

Conservar ao abrigo de luz e calor.

Somente para uso odontológico.

Utilizar tabela de articulação e escala de cor.

Composição: Polimetilmetacrilato, Fluorescente e Pigmentos Biocompatíveis.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro da ANVISA N°: 81941860001.

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil