

Ficha Técnica  
**TRIPLUS**

Dente Acrílico 3 Camadas



**Dentária Brasil**

## **Indicação:**

O Triplus é indicado para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

## **Características e Benefícios:**

- Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
- Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
- Produzidos com alta tecnologia, em matrizes cujos moldes digitalizados propiciam maior fidelidade, simetria e riqueza de detalhes.
- Compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- Contém carga de OMC\*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
- Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
- Angulação de 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão

## **Apresentações:**

Escala de Cores: 1A,2A,2B,4B,1C,1D e BL3.

## **Modelos disponíveis:**

Posteriores superior e inferior: M2,M3,M4,M5 e M6.

Anteriores superiores: E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44 e T4B.

Anteriores inferiores: L1, L3, L5, L7, L10, K6, K10 e K12.



**Instruções de Uso:**

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes.

**Recomendações ao paciente:**

Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

**Advertências e precauções:**

Conservar ao abrigo de luz e calor.

Somente para uso odontológico.

Utilizar tabela de articulação e escala de cor.

**Composição:** Polimetilmetacrilato, Fluorescente e Pigmentos Biocompatíveis.

**Validade:** 10 anos a partir da data de fabricação.

**Cadastro da ANVISA N°:** 81941860001

**Responsável Técnico:** Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br

