

Ficha Técnica

DUPLICADOR **IDEAL**

Gelatina Duplicadora



DentáriaBrasil

Indicação:

Gelatina duplicadora extra-dura para fundições de cromo cobalto.

Embalagem:

Frasco de 1kg.

Preparo:

Picar o DUPLICADOR IDEAL em pedaços de 1cm, colocar em uma panela, para facilitar a liquefação;

Aquecer no fogo baixo, mexendo durante o derretimento com uma colher de madeira, para manter sua homogeneidade;

Preparar o modelo de gesso a ser reproduzido na mufla especial para duplicação em PPR;

Quando o DUPLICADOR IDEAL estiver mais ou menos a 45°C, verter a mufla para realizar a cópia;

Após a gelificação, retirar o modelo da mufla e vaziar o molde com revestimento, no qual será fundida a PPR em cromo-cobalto.

Características e Benefícios:

- O DUPLICADOR IDEAL derrete em temperatura maior que 70°C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade, o que é importante para a reprodução dos detalhes.
- Possui alto poder de cópia.
- Permite maior aproveitamento devido à excelente fluidez.
- Pode ser reciclado adicionando-se água até atingir a fluidez desejada.
- Pode ser derretido em banho-maria, equipamento próprio ou micro-ondas.
- Não forma resíduos, mantendo a qualidade e translucidez inicial.
- Mantém suas propriedades após vários ciclos e rende mais.

Advertências/ precauções:

- O aquecimento do DUPLICADOR IDEAL deve ser feito de forma a não ferver, para evitar bolhas.
- O Agar-Agar presente no produto é facilmente contaminado com fungos. Os conservantes evitam a contaminação, até um certo momento. Mesmo tendo pontos de contaminação na superfície, não há consequências na capacidade de cópia.
- Na reciclagem do DUPLICADOR IDEAL recomenda-se a adição de água, a cada 3 usos, para manter a fluidez do produto.

**DentáriaBrasil**

Potência do Forno (Watts):

Potência do forno (whatts)	Ciclo no Micro-ondas	
	500g duplicador	1000g duplicador
500	5 min. 100% + 3 min. 50%	7 min. 100% + 6 min. 50%
800	3 min. 100% + 4 min. 20%	5 min. 100% + 4 min. 50%
900	3 min. 100% + 3 min. 50%	4 min. 100% + 4 min. 50%
1200	2 min. 100% + 1 min. 20%	3 min. 100% + 3 min. 50%
1400	2 min. 100% + 1 min. 20%	3 min. 100% + 2 min. 50%

Composição: Agar-Agar , Glicerina , Conservantes e Água.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro da ANVISA N°: Produto Isento de Registro na ANVISA.

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br

