

Ficha Técnica

PASTA PARA POLIMENTO **IDEAL**

Acabamento e brilho para prótese dentária



Dentária Brasil

Indicação:

Indicada para o polimento de metais e resinas acrílicas. Também pode ser usada para o pré-polimento ou polimento em alto brilho, em conjunto com escovas, discos ou rodas do tipo: pelos de cabras, couro, feltro, algodão e flanela.

Características/Benefícios:

- De consistência pastosa é facilmente aplicada.
- Garante um brilho duradouro e único para peças em metais e acrílicos.

Instruções de Uso:

Dependendo da textura da superfície desejada, a restauração deve ser pré-polida com a Pasta de Polimento Ideal com escova de pelo de cabra. após esta etapa, a restauração deve ser polida a alto brilho, com o uso da Pasta de Polimento Ideal e polidores de couro ou de algodão.

O uso de discos de couro ou camurça promovem um alto brilho, já polidores de algodão possibilitam um brilho menor.

Importante: Após o polimento, a superfície da restauração deve ser limpa, e completamente lavada com água e sabão.

Advertências e Precauções:

Manter fora do alcance de crianças.

Não inalar os vapores.

Irritante para os olhos e pele, portanto, evitar contato com ambas as partes.

Nos casos de ingestão, não induzir o vômito e procurar o médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com grande quantidade de água.

Evitar a contaminação da água e do sistema de esgoto.

Temperatura de armazenagem recomendada: 12-28°C.

Apresentação:

Frasco de 60g.

Contraindicação:

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil

Armazenamento:

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.

Composição:

Óxido de alumínio e di (2-hidroxietyl).

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Produto isento de cadastro na ANVISA.

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano – CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil