

Ficha Técnica

PEDRA POMES **IDEAL**

Limpeza e Polimento de Trabalhos Odontológicos



Dentária Brasil

Indicação:

Pedra Pomes Ideal é indicada para acabamento e limpeza de trabalho odontológicos como esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

Instruções de Uso:

Para cada 100g de Pedra-pomes Ideal utilize 40 mL de água.

Para o polimento do acrílico utilize escovas de pelo ou escova de algodão com pedra-pomes. Lembrando que não se deve exercer pressão durante o polimento evitando queimar a resina.

Advertências e Precauções:

- Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto, conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de uso contínuo, sugerimos o uso de máscara e luvas.
- Em caso de ingestão lave bem a boca e não provoque vômito.
- Em caso de contato com a pele ou cabelo, lave bem as partes afetadas, retirando toda a vestimenta contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
- Em caso de contato com os olhos, lave cuidadosamente e demoradamente com água, em caso de uso de lentes de contato, retire-as se o processo for fácil e continue enxaguando.
- Em caso de inalação, remova a pessoa para um local ventilado, facilitando sua respiração. Contate imediatamente um centro de informação toxicológica (CIT-fone 0800-643-5252) ou procure um médico.
- Após a utilização, lave e seque as mãos com bastante água corrente, bem como os utensílios usados como medida antes de reutilizá-los.

Apresentação:

Frasco de 100g e pacote de 1000g.

Gramatura: Fina.

Cor: Branca.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil

Contraindicação:

Nunca misture diferentes produtos químicos sem conhecimento, não reutilize a embalagem vazia.

Armazenamento:

Mantenha o produto em embalagem original e bem fechada, ao abrigo de luz, calor, fontes de ignição, umidade e fogo.

Composição: Pedra Pomes.

Validade: 2 anos.

Produto isento de cadastro na ANVISA.

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano – CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br

