

Ficha Técnica

VASELINA IDEAL

Agente Isolante para Resinas Odontológicas



Dentária Brasil

Indicação:

Indicada para isolar resinas acrílicas odontológicas. Também é usada como agente desmoldante para borracha e plásticos em geral.

Características/Benefícios:

- Produto de fácil manuseio.
- Proporciona alta lubrificação.

Instruções de Uso:

Dependendo da textura da superfície desejada, a restauração deve ser pré-polida com a Pasta de Polimento Ideal com escova de pelo de cabra. Após esta etapa, a restauração deve ser polida a alto brilho, com o uso da Pasta de Polimento Ideal e polidores de couro ou de algodão.

O uso de discos de couro ou camurça promovem um alto brilho, já polidores de algodão possibilitam um brilho menor.

Importante: Após o polimento, a superfície da restauração deve ser limpa, e completamente lavada com água e sabão.

Advertências e Precauções:

- Armazenar em sua embalagem original, em área seca e ao abrigo de luz, em temperatura ambiente.
- Evitar extremo calor e chama aberta próximo ao produto .
- Estocar longe de alimentos e bebidas.
- Não descartar os resíduos em esgotos e curso d'água ou lixo doméstico.
- Produto destinado somente para uso odontológico.
- Manter fora do alcance de crianças.

Apresentação:

Versão sólida: Frasco de 100g, 200g, 450g e 1000g

Versão líquida: 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml.

Contraindicação:

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil

Armazenamento:

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.

Composição:

Destilado Parafínico Leve Hidratado 100%

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Produto isento de cadastro na ANVISA.

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano – CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil