

# Ficha Técnica

# **BRILHO IDEAL**

Acabamento e Polimento para Prótese Dentária



**Dentária Brasil**

**Indicação:**

Brilho Ideal é um produto para a finalização do seu trabalho em prótese dentária. Possui duas versões complementares Brilho Ideal para Acabamento e Brilho Ideal para Polimento.

**Características/Benefícios:**

- Facilitam a limpeza proporcionando melhor resultado e agilidade no trabalho.
- Não agredem a escova de polimento, devido à sua fórmula balanceada.
- Polimento e acabamento à seco.
- Não aderem as ameias da prótese.
- Possibilitam um brilho sem sujeira.
- Diminuem o risco da infecção cruzada.

**Instruções de Uso:**

Após os processos de polimerização, resfriamento total e extração da prótese da mufla, retirar os excessos de resina com broca tungstênio ou pedra abrasiva; Com o objetivo de acabar com as imperfeições, utilize no mandril lixa 180 ou 220 de madeira e deslize toda a superfície da prótese sobre a lixa; Para acabamento comece utilizando em motor tipo torno, com velocidade baixa, escova de cerdas nº 10 ou 120. Aplique na escova o BRILHO IDEAL para ACABAMENTO , (de cor azul ), e passe toda a extensão da prótese nela, proporcionando um trabalho limpo e diminuindo vastamente o risco de infecção cruzada. Para obter brilho finalizar utilizando o BRILHO IDEAL para POLIMENTO, (na cor branca), aplicando-o em uma escova de flanela. Assim que houver aderência do produto na escova, passar a prótese na mesma até obter o resultado desejado.

**Advertências e Precauções:**

Conservar ao abrigo de calor.

Utilizar equipamento de proteção individual.

**Apresentação:**

Bastão para Acabamento com 150g na cor azul.

Bastão para Polimento com 150g na cor branca.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



**DentáriaBrasil**

**Armazenamento:**

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.

**Composição:**

Bastão para acabamento: Dióxido de Silício, Pigmentos, Ceras Artificiais.

Bastão para polimento: Dióxido de Silício Ceras Artificiais.

**Validade:** 5 anos a partir da data de fabricação.

Produto isento de cadastro na ANVISA.

**Responsável Técnico:** Renato de Castro Caetano – CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



**DentáriaBrasil**