

Ficha Técnica

Primus

Dente Acrílico 2 Camadas



Dentária Brasil



Indicação:

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

Características e Benefícios:

- Prensagem de duas camadas, propiciando um aspecto natural;
- Produzidos com alta tecnologia, em matrizes cujos moldes digitalizados conferem maior fidelidade, simetria e riqueza de detalhes;
- Compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico;
- Fabricados com matérias primas selecionadas que harmonizam com a base da prótese, o que proporciona uma melhor adesão entre as superfícies;
- Alta estabilidade de cores, com tons mais naturais;
- Maior robustez, cúspides detalhadas, facilitando a precisão do trabalho e possibilitando perfeita oclusão;
- Com fluorescência, colaborando também para um aspecto natural;
- Angulação de 33° nos posteriores, ocasionando uma melhor oclusão;

Apresentações:

Escala de Cores: 59, 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos disponíveis:

Posteriores superiores e inferiores: 30M, 32M, 34M, 30L, 32L e 34L.

Anteriores superiores e inferiores: 2D, 2N, 3N, 3P, A25/2E, A26/46, 264, 2P, 266/26 e 268/3R.

Instruções de Uso:

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes.



Primus

Recomendações ao paciente:

Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Advertências e precauções:

Conservar ao abrigo de luz e calor.

Somente para uso odontológico.

Utilizar tabela de articulação e escala de cor.

Composição: Polimetilmetacrilato, Fluorescente e Pigmentos Biocompatíveis.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro da ANVISA N°: 81941860001.

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga – SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



Dentária Brasil