

Ficha Técnica

REMOVEDOR IDEAL

Removedor de Cera



Dentária Brasil

Indicação:

Indicado para a remoção de resíduos de ceras e gorduras na confecção de próteses odontológicas e limpeza de gorduras e graxas em geral.

Características/Benefícios:

- Pode ser utilizado na técnica tradicional ou de micro-ondas.
- Retira qualquer resíduo de cera, gorduras e graxas, colaborando para maior aderência do dente na base da prótese.
- Inodoro, não deixa qualquer tipo de resíduo.

Instruções de Uso:

Após a inclusão na Mufla e cura do gesso, deve-se retirar a cera, uma vez que os dentes já estão posicionados.

Para isso, aqueça a água num recipiente separado. Mergulhe a Mufla por cerca de 5 minutos nesse recipiente e abra para retirar a cera derretida.

Lave as superfícies internas da Mufla com algodão embebido em Removedor IDEAL, friccionando por toda a peça, retirando os resíduos de cera. Repita a operação caso necessário. Se for utilizada a Mufla para micro-ondas, realize o aquecimento no forno micro-ondas por 3 minutos em potência baixa, e retire os resíduos da cera, com algodão umedecido no Removedor IDEAL, friccionando sobre a área a ser limpa. Para limpeza ainda mais completa, preencha a cavidade da Mufla com uma mecha de algodão seco; feche a Mufla e em seguida, repita a operação de aquecimento no forno de micro-ondas.

Advertências e Precauções:

- Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção;
- Conserve ao abrigo da luz e calor;
- Produto inflamável e volátil;
- Mantenha o frasco bem fechado;
- Não use próximo ao fogo e não aplique em superfícies aquecidas;
- Mantenha fora do alcance das crianças;
- Evite contato com a pele e com os olhos;
- Se causar irritações, lave com água corrente e, caso ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procure auxílio médico.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil

Apresentação:

Frasco de: 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml.

Contraindicação:

Quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais não existem efeitos colaterais adversos conhecidos.

Armazenamento:

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.

Composição:

Hidrocarbonetos Alifáticos Aromáticos.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Produto isento de cadastro na ANVISA.

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano – CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil