

Ficha Técnica

ANTI-BOLHA IDEAL

Redutor de Tensão Superficial



Dentária Brasil

Indicação:

O Anti-Bolhas Ideal, fabricado pela Dentária Brasil, alivia a tensão superficial da água contida no gesso durante o vazamento de modelos, facilitando o escoamento do gesso nas moldagens de silicone e minimizando o aparecimento de bolhas indesejáveis no trabalho.

Características e Benefícios:

- Propicia modelos de gesso com superfícies altamente lisas e isentas de porosidades;
- Também pode ser aplicado nas moldagens dos dentistas evitando defeitos nos vazamentos.

Apresentação:

Embalagem em spray de 100 ml.

Instruções de Uso:

Aplique o Anti-Bolhas Ideal em toda a superfície da moldagem de silicone ou padrão de cera ANTES de vazar o modelo. Seque com um jato de ar e vaze o modelo ou faça a inclusão, como de costume.

Advertências e Precauções:

- Somente para uso odontológico.
- Líquido: Material inflamável, não tóxico.
- Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis.
- Seguir os procedimentos usuais para controle microbiológico, montagem, articulação e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.
- Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.
- Descarte o produto de acordo com as normas locais.

Condições de Armazenamento:

Conservar ao abrigo de luz e calor, fechado em local seco e fresco.

Composição: Álcool Etílico, Água Deionizada, Surfactante, Corante e Solvente T.

Validade: 4 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro da ANVISA Nº: Produto Isento de Registro na ANVISA.

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br

