

Ficha Técnica
GLAZEIDEAL
Verniz para Acabamento



Dentária Brasil

Indicação:

GLAZE IDEAL, fabricado pela Dentária Brasil, é indicado para restabelecer o brilho de aparelhos ortodônticos móveis novos ou aparelhos que perderam o brilho durante o uso e após consertos e reembasamento.

Modo de usar:

Antes de iniciar o tratamento da peça, leia com atenção todos os itens dessa instrução. Preparo do substrato dental:

- O substrato que irá receber Glaze Ideal deve estar limpo e seco. A manipulação deve ser realizada com luvas para eliminar possíveis sujidades e/ou gorduras das mãos.
- Aplicar suavemente uma fina camada uniforme utilizando um pincel macio em um sentido único evitando bolhas.
- Caso a peça não tenha sido prensada recomenda-se no mínimo três demãos.
- Este produto realiza uma perfeita união química com a superfície da peça, sendo compatível com Resina Acrílica Autopolimerizável e peças usinadas em impressora 3D.

Advertências e Precauções:

- Somente para uso odontológico;
- Líquido: material volátil e inflamável, não tóxico (Ponto de Fulgor: -4°C);
- Como em todas as resinas acrílicas, recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção;
- O manuseio desta resina não é recomendável para gestantes, lactantes e pessoas com sensibilidades reconhecidas para este tipo de produto;
- Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis;
- Conservar ao abrigo da luz e calor;
- Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.

Apresentação:

Frasco com tampa pincel de 10ml.

Contraindicações:

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Cores disponíveis: Incolor



Composição: Metacrilato, Inibidor, Hidroquinona, Base Acrílica.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação

Nº Registro Anvisa: 81941869006

Responsavel técnico: Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 97426-4848 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br

