

Ficha Técnica

OPACIFICADOR **IDEAL**

Caracterização Metálica para Prótese Dentária



DentáriaBrasil

Indicação:

O Opacificador Ideal, autopolimerizável, fabricado pela Dentária Brasil, é recomendado para o recobrimento de estruturas metálicas, como PPRs e protocolos.

Contra indicações:

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Advertências/Precauções:

- A embalagem deve permanecer sempre bem fechada e em local refrigerado.
- Guardar ao abrigo de luz e calor.
- Lavar com água em abundância e procurar ajuda médica em caso de contato com os olhos.
- Aguardar a secagem completa e só depois aplicar o material, (resina /cera), sobre a peça.
- Não aplicar nenhum tipo de líquido sobre a peça opacificada antes da secagem total.
- O produto é incompatível com álcool ou solventes.

Instruções de Uso:

- O produto já vem pronto para uso, sendo necessário agitar bem antes de usar.
- A peça a ser recoberta deve estar sempre limpa, livre de gordura, poeira ou resíduos. (Para isso pode-se usar o Removedor Ideal).
- O metal pode ser aquecido a partir de 35°C até, no máximo, 60°C.
- Para acelerar o processo da secagem (pode-se aquecer o metal mergulhando em água fervente ou colocando próximo à boca do forno).
- Em seguida aplicar uma demão bem fina de Opacificador Ideal e aguardar a secagem ao toque (+/- 10 minutos em temperatura ambiente de 23°C), o tempo varia de acordo com a temperatura do metal.
- Se necessário, aplicar outra demão e aguardar a secagem total (certificar se, ao toque manual, não adere aos dedos).

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br



DentáriaBrasil

- A peça opacificada pode ser colocada próxima a uma fonte de calor, a fim de obter-se uma secagem mais rápida. Como, por exemplo, exposição ao sol ou à boca do forno por alguns minutos, até que a secagem seja confirmada pelo toque dos dedos.

Apresentações:

Embalagem com 1 unidade de 10ml.

Disponível nas cores: Neutro, Rosa Claro, Rosa Médio, Rosa Escuro, Dentina 60, 62 e 66.

Composição:

Água / Poliacetato de Vinila / Corantes / Essência Artificial.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro da ANVISA Nº: 819441869004

Responsável Técnico: Renato de Castro Caetano - CRQ IV 04480318.

Fabricado por:

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda

IE 536.097.880.119 CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera km 211, Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520 sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br

